

Bruksanvisning Prisma

För bästa resultat rekommenderar Catell att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Användningsområde


Ortosen stödjer och avlastar brukarens hand, handled och underarm efter skada, operation, kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment. Rådgör med din ordinator eller utprovare om val av modell eller kontakta Catell.

Applicering

1. Ortosen har en förböckad volar skena. Behöver denna vinkel ändras så tag ur skenan ur skenfickan och bocka om efter brukarens handled och behov.
2. Öppna samtliga kardborrband och stäng tumgreppet. Placera handen i ortosen enligt bilden.
3. Knäpp samtliga kardborrband så att ortosen sitter behagligt. Justera tumgreppet.

För dorsalt stöd finns valmöjlighet enligt följande:

- För rejält stadigt stöd, behåll befintliga metallskenor i skenfickorna. Dessa kan behöva bockas till efter handledens dorsala vinkel.
- För att tillåta viss dorsal rörlighet, öppna kardborren på dorsala skenfickorna och byt ut metallskenorna till medföljande plastskenor.

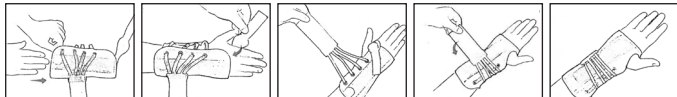

Klipp av överflödigt kardborrband så får ortosen ett renare och snyggare utseende.

Samtliga kardborrband kan behöva justeras med jämna mellanrum beroende på vilka situationer ortosen används i. Det viktiga är att ortosen sitter behagligt och utan att klämma eller skava. Om problem uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

Material

Stabil Plus: Bomull, polyester, gummi.

Tvättråd

Slut kardborrbanden och ta ut ev. skena ur skenfickan. Följ tvättråd nedan.
Använd gärna tvättpåse. Låt ortosen droptorka.



Måttabell

Strl	* Mått	Strl	* Mått
XS	12-14 cm	L	18-20 cm
S	14-16 cm	XL	20-22 cm
M	16-18 cm		

* Mått tages runt handled

Catells målsättning är att våra produkter skall vara till god hjälp i behandling av skador eller sjukdomar som kan uppkomma. Om några oklarheter uppstår kring användandet av våra produkter vänligen kontakta oss omgående.