

Bruksanvisning Catell Gelplatta

Användningsområde

- Motverkar ärrbildning
- Tryckavlastande
- Kan användas mot besvär som orsakats av torrhet
- Hyperestesi

Tips

- Rengörs med ljummet vatten och mild tvål

Rekommendationer

- Tvätta och torka området som ska behandlas
- Placera gelen direkt över området som ska behandlas
- Avlägsna produkten minst 3-4 timmar dagligen så att huden får andas

Varning

- Produkterna får ej läggas på öppet sår
- Om irritation, obehag eller nedsatt cirkulation uppstår, kontakta läkare